

# CT装置 清掃・消毒ガイド

「取扱説明書 (2B203-115JA\*B) 」第14章 より、抜粋。

## 14.2 清掃・消毒

ご使用後は、装置本体、寝台付属品およびオプション機器を清掃・消毒してください。

この装置はスポルディング（Spaulding）の分類上、ノンクリティカル器材です。直接患者に接触することを想定していないため、装置全体の消毒および滅菌を意図して設計されていません。

ただし、装置カバーなど部分的な消毒は可能としています。

血液など有機物が付着した装置カバー表面を消毒する必要がある場合は、この節の記載内容に従い適切に処置してください。

### ⚠ 危険

この装置は防爆形ではないので、装置の近くで可燃性および爆発性の気体を絶対に使用しないでください。製品の内部に入った場合、火災や爆発を起こすおそれがあります。

- \* 清掃・消毒の後、室内を十分に換気してから装置の電源を入れてください。

### ⚠ 警告

保守点検は、安全を確認した上で行ってください。

- \* 清掃・消毒は、装置の電源を切った状態で行ってください。電源が入っていると、スイッチに触れたときに装置が動きだし、けがをするおそれがあります。

※ 通常は分電盤を OFF にしないでください。点検等の理由で分電盤を OFF にするときは、X 線管 OLP が 20%以下になってから OFF にしてください。X 線管の寿命が短くなることがあります。

### ⚠ 注意

装置本体、寝台付属品およびオプション機器の表面に血液が付着した場合など、清掃・消毒が必要な場合には、取扱説明書の記載に従って処置してください。

- \* 感染の可能性がある場合は、使い捨ての保護手袋を着用してください。
- \* 消毒をする場合は、消毒用薬品の取扱説明書をお読みになり、使用上の注意および薬品の特性を確認して、その指示に従ってください。  
また消毒は、製品本体、寝台付属品、オプション機器の表面に対して行ってください。

## 注意

1. 清掃・消毒をする場合は、装置を傷つけないように注意してください。
  - \* 寝台付属品のうち、バンドなど合成繊維および合成皮革の製品に対する消毒は、アルコールを使用しないでください。劣化につながります。
  - \* 清掃・消毒によって、装置に退色やひび割れが発生した場合は、装置の使用を中止し、最寄りのサービスセンタに修理を依頼してください。
  - \* 装置には、指定の清掃・消毒用薬品を使用し、それに定められた使用方法および使用頻度をお守りください。指定以外の薬品を使用すると、外装に退色やひび割れが発生したり、劣化したりするおそれがあります。
  - \* シンナやベンジンなどの溶剤や、コンパウンドなど研磨材を含む物を、製品の清掃に使用しないでください。拭いた部分が白く曇ったり、傷が付いたりすることがあります。
2. 清掃・消毒をする場合は、操作パネルなどの電気部品に、中性洗剤液や消毒用薬品を直接吹きかけないでください。故障の原因になります。

## 14.2.1 清掃について

---

検査終了後に、装置カバーや寝台付属品などの表面の汚れを清掃する場合は、次に従って行ってください。

### 14.2.1.1 清掃可能な箇所

- ・ ガントリカバー
- ・ 寝台カバー
- ・ 寝台天板
- ・ 寝台付属品（ヘッドレスト、アームアップホルダ、マット類）

### 14.2.1.2 清掃で用いる道具

- ・ 装置を拭くための布は、やわらかい布巾またはガーゼを用いてください。
- ・ 清掃用薬品は、中性洗剤を使ってください。
- ・ 感染の可能性がある場合は、使い捨ての保護手袋を着用してください。

### 14.2.1.3 清掃の方法

- (1) やわらかい布巾やガーゼなどに、用法のとおり薄めた中性洗剤液を垂れない程度に含ませて、装置の表面を拭いてください。
- (2) 汚れを拭き取った後は、よく表面を乾燥させます。
- (3) 作業後に装置の外観に変化がないことを確認します。もし異常があった場合は、最寄りのサービスセンタに修理を依頼してください。

## 14.2.2 消毒について

清掃後に、装置カバーや寝台付属品などの表面を消毒する場合は、次に従って行ってください。

### 14.2.2.1 消毒可能な箇所

- ・ ガントリカバー
- ・ 寝台上部カバー
- ・ 寝台天板
- ・ 寝台付属品（ヘッドレスト、アームアップホルダ、マット類）

### 14.2.2.2 消毒で用いる道具

- ・ 装置を拭くための布は、やわらかい布巾またはガーゼを用いてください。
- ・ 使い捨ての保護手袋を着用してください。

### 14.2.2.3 消毒用薬品

薬品	使用時の濃度
イソプロピルアルコール	50 ～ 70 vol%
エタノール	60 ～ 90 vol%
塩化ベンザルコニウム	0.05 ～ 0.2 %

### 14.2.2.4 消毒の方法

- (1) やわらかい布巾やガーゼなどに、用法のと通りの消毒用薬品を垂れない程度に含ませて、消毒する表面を拭いてください。
- (2) 消毒用薬品を拭き取った後、乾いた布巾で乾拭きをするか、よく表面を乾燥させてください。